


SimCPR® Trainer App


Handleiding

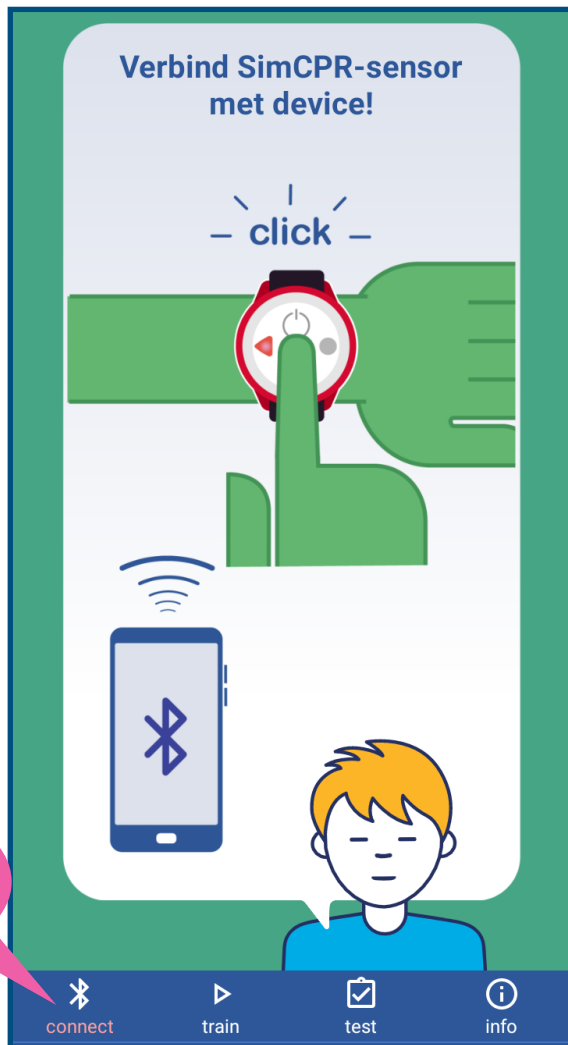

Tips!

- Gebruik een reanimatiepop die je minimaal 6cm kunt indrukken!
- Verbind de SimCPR® Trainer met de Trainer App. Maak geen Bluetooth-verbinding via de smartphone instellingen.
- Zorg ervoor dat 'connect' onder het Bluetooth-symbool, groen is voordat je begint!
- Wanneer er meerdere SimCPR® Trainers aanwezig zijn, controleer dan dat jouw SimCPR® Trainer is verbonden met jouw smartphone.
- Wanneer je geen contact krijgt met de SimCPR-sensor, open dan alle schermen en sluit deze! Open opnieuw de SimCPR® Trainer App en druk op het Bluetooth symbool links onderaan (connect).

Verbinden (sensor en app)

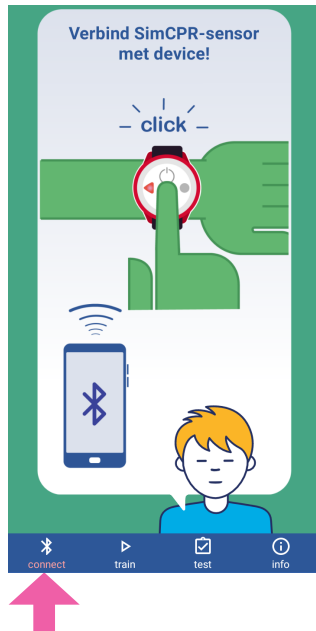

Annuleren Scan

SimCPR sensor -95 dBm
SimCPR sensor -29 dBm
SimCPR sensor -70 dBm
SimCPR sensor -72 dBm

- Verbind de SimCPR-sensor door op het Bluetooth-symbool te drukken (connect)!
- Druk vervolgens op de juiste SimCPR-sensor die in beeld verschijnt (Scan) om de verbinding te starten.


Meerdere SimCPR®Trainers aanwezig?

De SimCPR-sensor die het meest dichtbij is heeft het meeste aantal donkere signaalstaafjes.

Door met je vinger op die sensor te drukken, verbind je jouw sensor met jouw device!

Train hartmassage

Start hartmassage!

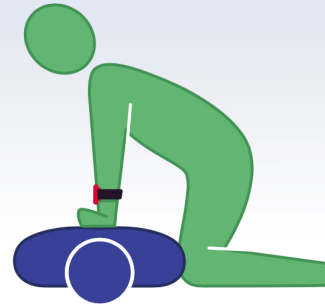

Wachten op data!




- Controleer of tekst 'connect' linksonder groen is!
- Na een paar seconden start het scherm hiernaast.
- Plaats je handen in het midden van de borstkas!
- Plaats je schouders en armen loodrecht boven het borstbeen!
- Druk de borstkas stevig in!
- Laat de borstkas weer geheel omhoog komen en blijf niet leunen!

Krijg eerst feedback over diepte en dan tempo. Daarna krijg je feedback over diepte en tempo tegelijkertijd.




Test hartmassage

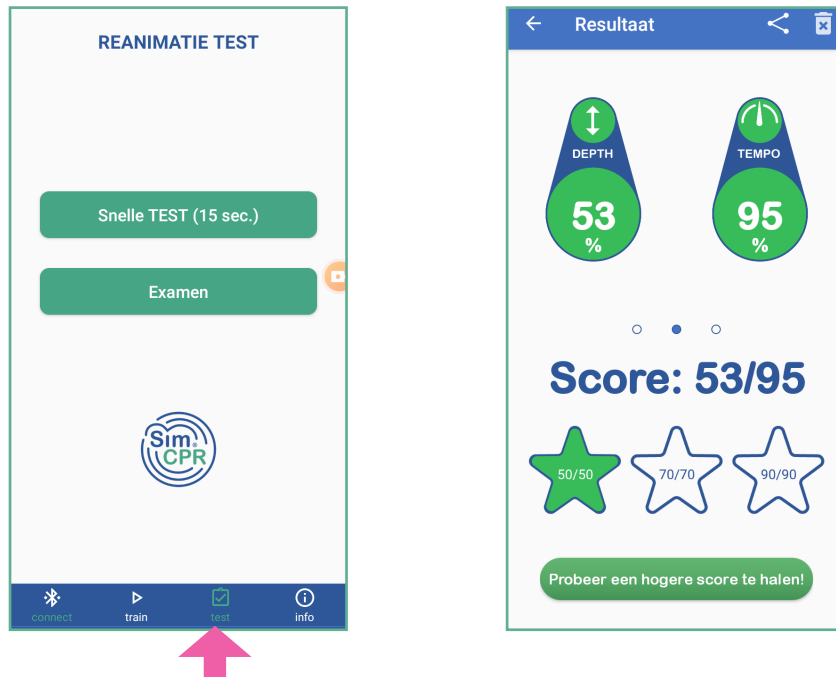

- Controleer of tekst 'connect' linksonder groen is!
- Druk op test-modus en selecteer eerst de *Snelle TEST (15 sec.)*!

Zodra je score minimaal 2-sterren is, kun je verder gaan met het Examen (bij minimaal 1 minuut hartmassage).

Resultaat scherm

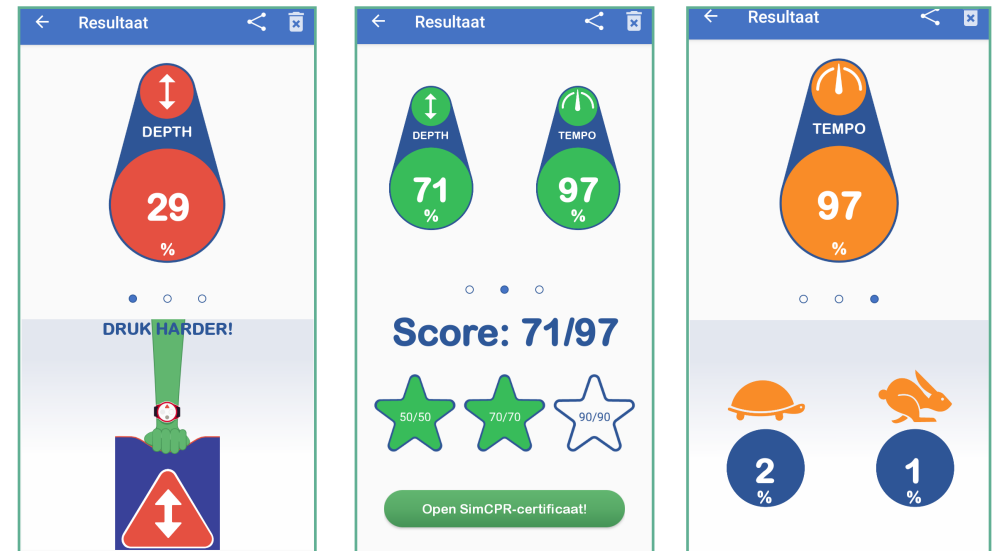

De resultaat schermen laten de percentages zien van juiste diepte ($\geq 5\text{cm}$) en tempo (97-123/min).

Door het scherm naar links of rechts te swipen krijg je extra informatie over diepte en tempo.

Score certificaat!


Zodra je bij een examen 2 of 3-sterren behaalt (minimaal 70%-score op diepte en tempo), dan kun je hiermee een eigen SimCPR score-certificaat aanmaken.

Vul je voornaam in met achternaam en geboortedatum en ontvang gratis je persoonlijke certificaat!



SimCPR-score certificaat

Name: **Remi Hero**
Date of birth: **23/11/1998**

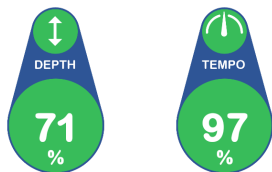

Score: 71/97







This certificate shows that candidate is competent in providing chest-compressions according to the international BLS-guidelines 2015 on depth/tempo and SimCPR-criteria. *
*www.simcpr.com

Issue Date:
23 November 2020

Recommended Renewal Date:
(after 6 month's)

Scores delen

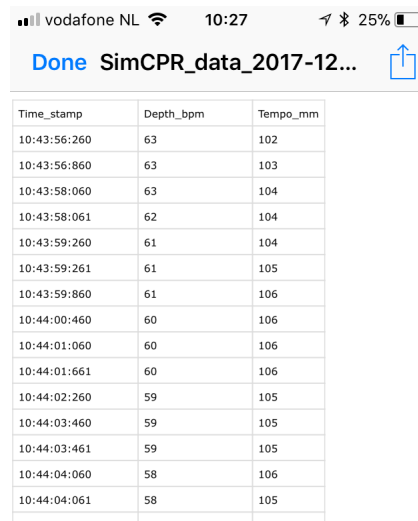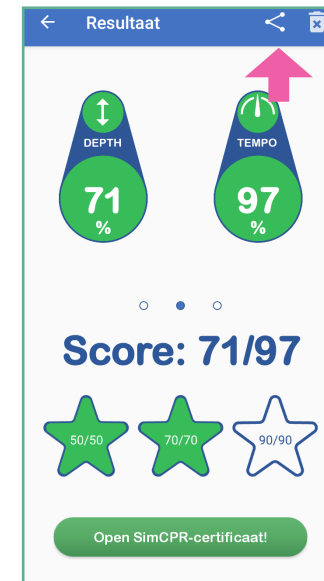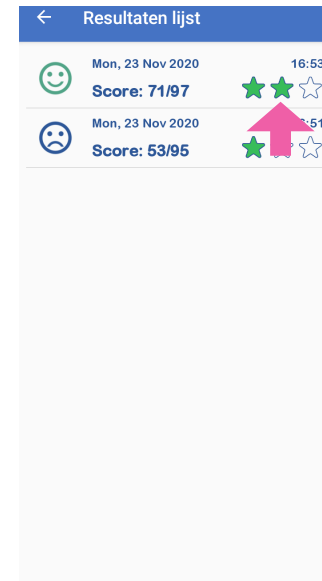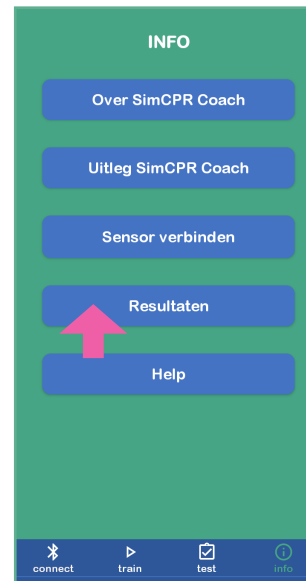

Time_stamp	Depth_bpm	Tempo_mm
10:43:56:260	63	102
10:43:56:860	63	103
10:43:58:060	63	104
10:43:58:061	62	104
10:43:59:260	61	104
10:43:59:261	61	105
10:43:59:860	61	106
10:44:00:460	60	106
10:44:01:060	60	106
10:44:01:661	60	106
10:44:02:260	59	105
10:44:03:460	59	105
10:44:03:461	59	105
10:44:04:060	58	106
10:44:04:061	58	105

Via het INFO-menu kun je op ieder moment jouw Examen-scores bekijken.

Je kunt certificaten en scores delen (diepte en tempo van hartmassages data tot 10 minuten) via email en social media.

Veel plezier!