



SmartCase SC1230 / SC1240

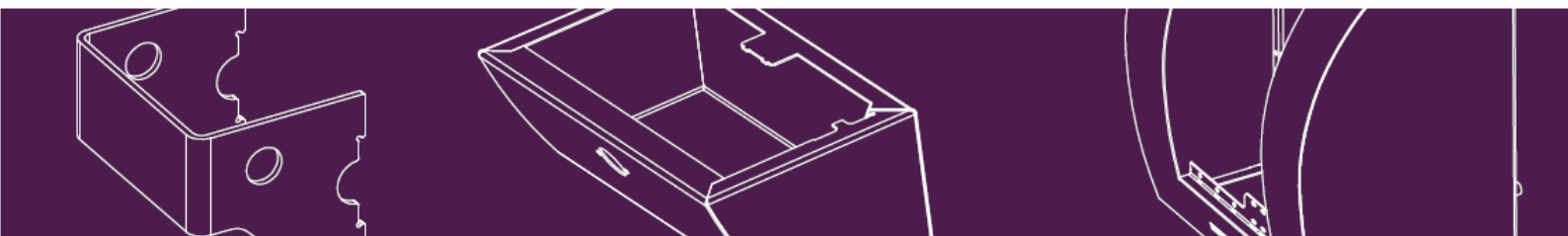



Indholdsfortegnelse

HVAD ER EN SMARTCASE?	3
FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD	3
KONVENTIONER.....	3
GARANTI	4
PRODUKTOVERSIGT	5
INSTALLATION	6
VIGTIGT	6
OPHÆNGNING PÅ STEN ELLER BETON	6
STRØMFORSYNING OG KABEL	6
ADVARSEL	7
OPHÆNG PÅ TRÆ.....	7
BRUG.....	7
VIGTIGT	7
VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING.....	8
VEDLIGEHOLDELSE	8
TEMPERATUR.....	8
TILPAS KODE (SC1240)	9
FEJLFINDING	10
ORDLISTE	11
APPENDIKS A: TEKNISK SPECIFIKATION	12

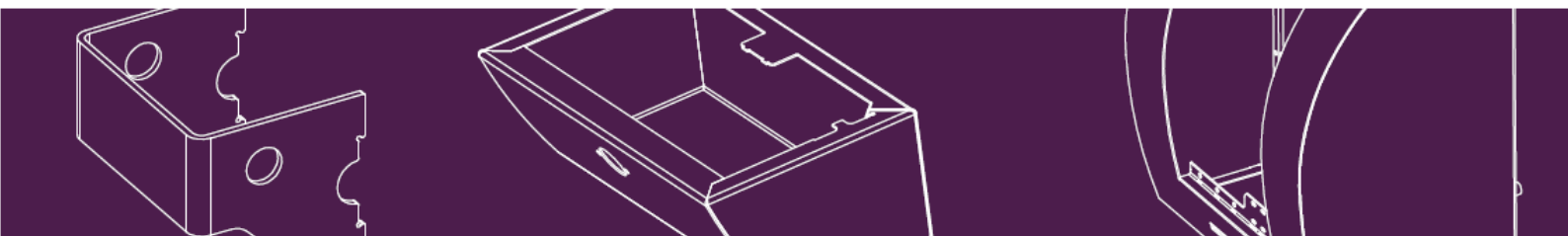

Hvad er en SmartCase?

AED'en (automatisk ekstern defibrillator) er et vigtigt medicinsk udstyr til hjælp i tilfælde af hjertesvigt. Det er vigtigt, at AED'en er beskyttet, sikret og tilgængelig 24/7 for øjeblikkelig støtte i tilfælde af en nødsituation. Dit SmartCase-skab giver optimal beskyttelse og sikrer, at AED'en er tilgængelig dag og nat.


SmartCase udendørs kabinet er designet til at beskytte AED'en mod ekstreme vejrforhold. Skabet er modstandsdygtigt over for vand, støv og hærværk og kombinerer et gennemprøvet koncept med maksimal ydeevne. Kabinettet i rustfrit stål kombineret med et vindue i polykarbonat giver den ultimative beskyttelse mod korrosion og stød og giver et klart udsyn til AED'en. For at sikre en temperatur på over 0°C er SmartCase-udendørsskabet udstyret med en temperatursensor og et elektrisk varmeelement. Kabinettet er fuldt isoleret for at spare energi under opvarmningen. Desuden er AED'en beskyttet mod overophedning ved hjælp af aktiv ventilation.

For din egen sikkerheds skyld

Konventioner Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt. Installatører og operatører bør læse sikkerhedsinstruktionerne, før de betjener SmartCase AED-skabet. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge instruktionerne i dette dokument. Følg alle anbefalede vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis der opstår et problem, skal du kontakte din forhandler.


		Symbol
Advarsel:	Advarselssymbolet gør dig opmærksom på situationer eller handlinger, der kan være farlige.	 ADVARSEL

GT MEDICARE forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre dette dokument og alle relaterede produkter i denne manual uden forudgående varsel. Indholdet af dette dokument stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

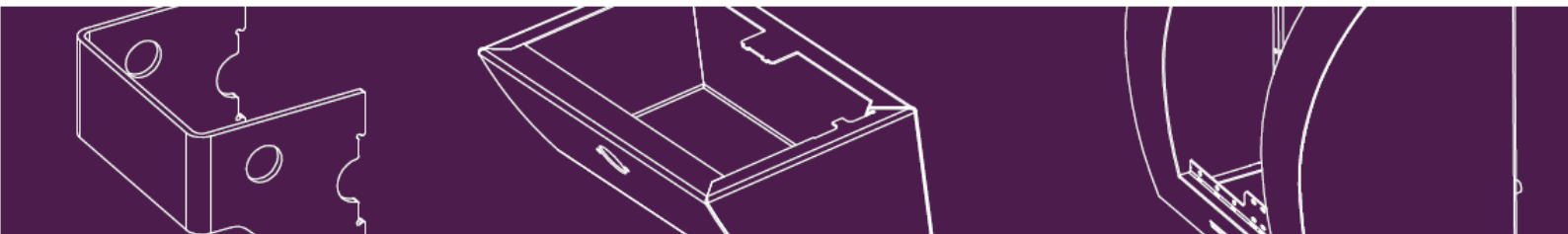

Garanti

1. GT MEDICARE står inde for kvaliteten af de ydelser, der leveres efter bedste evne og viden, og for sundheden og den gode kvalitet af de produkter, der leveres. Garantien går ikke ud over de bestemmelser, der er nævnt nedenfor.
2. Hvis fejlen er forårsaget af køberen, er alle reparations- og forsendelsesomkostninger købers ansvar.
3. Køberen kan ikke påberåbe sig garantibestemmelsen:
 - A: Hvis køberen har forsømt produkterne.
 - B: Hvis køberen har foretaget eller ladet foretage ændringer af produkterne, herunder reparationer, der ikke er udført af eller på vegne af GT MEDICARE.
 - C: I tilfælde af uforsigtig eller skødesløs brug, forkert tilslutning, forkert netspænding, lynnedslag, skader på grund af fugt eller andre eksterne produkter eller katastrofer.
 - D: Hvis enheden ikke er blevet vedligeholdt på sædvanlig vis eller som beskrevet i brugervejledningen.
 - E: Hvis enheden bruges med uhensigtsmæssigt tilbehør.
 - F: Hvis køberen har behandlet produkterne på anden uagtsom måde.
4. GT MEDICARE garanterer, at produkterne ikke indeholder alvorlige fejl på leveringstidspunktet.
5. Forhandleren skal rapportere krav vedrørende defekter, skader eller manglende overensstemmelse med produkterne, der med rimelighed kan bestemmes ved inspektion af produkterne, til GT MEDICARE skriftligt inden for 10 arbejdsdage efter modtagelse af produkterne i forhandlerens lokaler. Forhandleren skal rapportere alle andre krav skriftligt til GT MEDICARE inden for 1 år fra leveringsdatoen. Forhandleren skal straks returnere til GT MEDICARE, på GT MEDICAREs anmodning og for GT MEDICAREs regning, alle produkter, som forhandleren hævder er uoverensstemmende eller beskadigede til inspektion af GT MEDICARE. GT MEDICARE vil ikke acceptere krav, der ikke er fremsat i overensstemmelse med kravene og inden for de tidsperioder, der er nævnt i dette afsnit. GT MEDICARE skal, i tilfælde af at det er ansvarligt for produktets manglende overensstemmelse eller skade, efter eget valg reparere produkterne, erstatte dem med nye produkter eller returnere købsprisen for produkterne til forhandleren. GT MEDICARE har ingen anden forpligtelse eller ansvar over for forhandleren med hensyn til ikke-overensstemmende eller beskadigede produkter end det, der er angivet i den foregående sætning.
6. Varigheden af garantien på GT MEDICARE-enhederne er 24 måneder på alle mekaniske dele og elektronik i produkterne, hvor ridser og skader er udelukket fra denne bestemmelse. Garantiperioden starter fra leveringstidspunktet. Producenten er kun forpligtet til at opfylde de forpligtelser, der følger af disse garantibestemmelser. Producenten er ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader. I alle tilfælde er producentens ansvar begrænset til salgsprisen for de solgte produkter.
7. Hvis et krav kan spores tilbage til en ændring eller forkert brug af det produkt, der er beskrevet i kontrakten, er garantiordningen under ingen omstændigheder gyldig.
8. Hver forsendelse af varer vil blive undersøgt straks efter modtagelse af modtageren. Kunden skal skriftligt underrette GT MEDICARE om eventuelle mangler ved forsendelsen inden for ti (10) dage efter modtagelsen. Hvis disse mangler ikke er blevet rapporteret skriftligt inden for en periode på ti (10) dage, skal parterne indbyrdes anses for, at forsendelsen var fuldstændig. For skjulte fejl, der skal bevises af kunden, er krav kun mulige inden for garantiperioden. Hvis GT MEDICARE finder et krav velbegrundet, er GT MEDICARE udelukkende forpligtet til at udskifte eller reparere de defekte varer, uden at kunden derudover kan gøre nogen som helst ret til erstatning gældende. Indsendelse af et krav vil aldrig frigøre kunden fra hans/hendes betalingsforpligtelser.

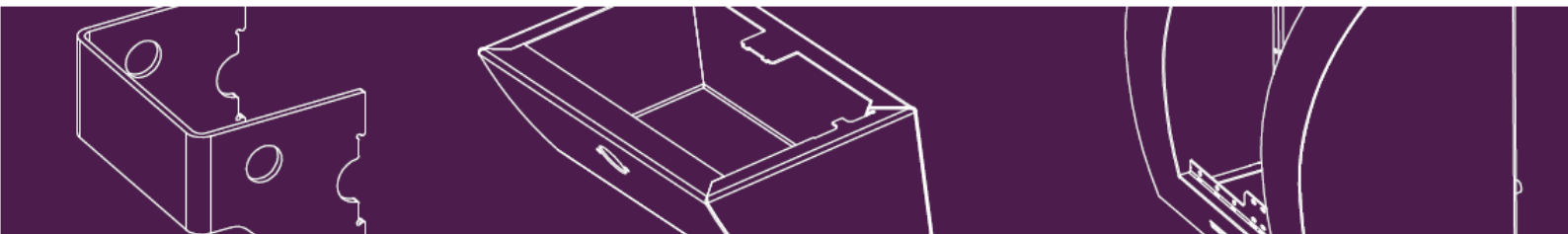

Produktoversigt

Tak, fordi du har købt denne SmartCase.

SmartCase indeholder følgende komponenter:

SmartCase SC1230 og SC 1240

- SmartCase AED-skab (isoleret)
- 24V-adapter
- Strømkabel 3 m (forudinstalleret)
- Hurtig installationsvejledning
- Elektrisk varmeelement og AED-holder
- Ventilator til aktiv ventilation
- LED-belysning (rød og blå)
- Alarm, >95dB
- Installationsmateriale

Installationsmateriale:



Skiver (4x)

M8-møtrikker (4x)

Afstandsstykker af nylon (4x)

Vægstik (4x)


Pindeskruer (4x)

SmartCase SC1240

- Nøgle

SC 1240 er udstyret med en mekanisk kodelås. Der medfølger en ekstra reservenøgle til denne type.



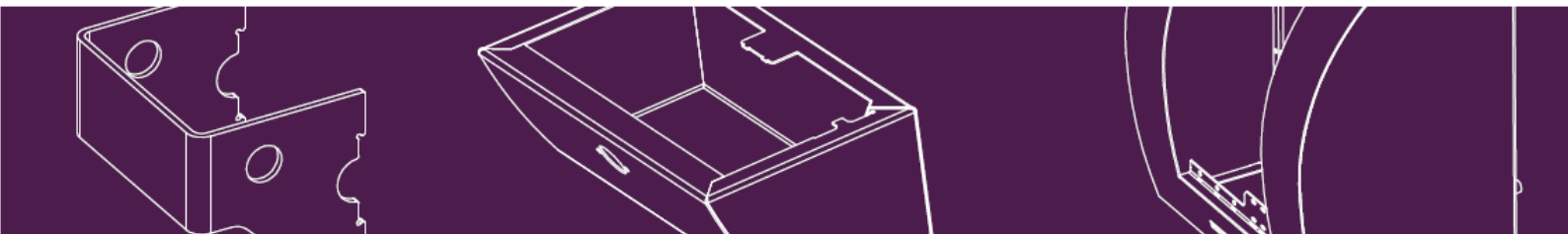

Installation

Vigtigt Det medfølgende installationsmateriale er kun beregnet til ophængning på en jævn overflade af træ, (mur)sten eller beton. Panelerne skal have en tykkelse på mindst 3 mm. Brug altid de medfølgende afstandsstykker. Vi anbefaler at hænge skabet i skyggen for at undgå høje temperaturer inde i skabet.

Ophængning på sten eller beton Bor 4 huller med en indbyrdes afstand på 240 mm. Bor de 10 mm store huller til en dybde på mindst 60 mm for at sikre tilstrækkelig dybde til propperne. Vi anbefaler at bore de øverste huller i en højde på mellem 1,5 og 1,6 m over jorden. Hullerne skal altid bores i midten af (mur)stenen. Skru M8-skruerne i stikkene, indtil de stikker 20 mm ud fra væggen, og skub nylonafstandsstykkerne over skruerne. Sæt nu strømkablet i, før du hænger skabet op på væggen.




1: Sæt stikkene i, og sæt skruerne




2: Placer afstandsstykkerne

Strømforsyning og kabel GT MEDICARE anbefaler, at der bores et 12 mm hul, hvor strømkablet kan føres gennem væggen. Det kan derefter tilsluttes 24V-adapteren, som skal placeres inde i huset eller bygningen. Det er vigtigt at føre strømkablet gennem væggen, før skabet hænges op på væggen. Strømkablet er allerede fastgjort til indersiden af SmartCase (forudinstalleret). Før kablet udefra og ind, og træk det derefter længere ind fra indersiden. SmartCase er nu klar til at blive hængt op på væggen. Når pindeskruerne er sat på, kan du montere skiver og møtrikker for at sikre kufferten (på indersiden af kufferten).

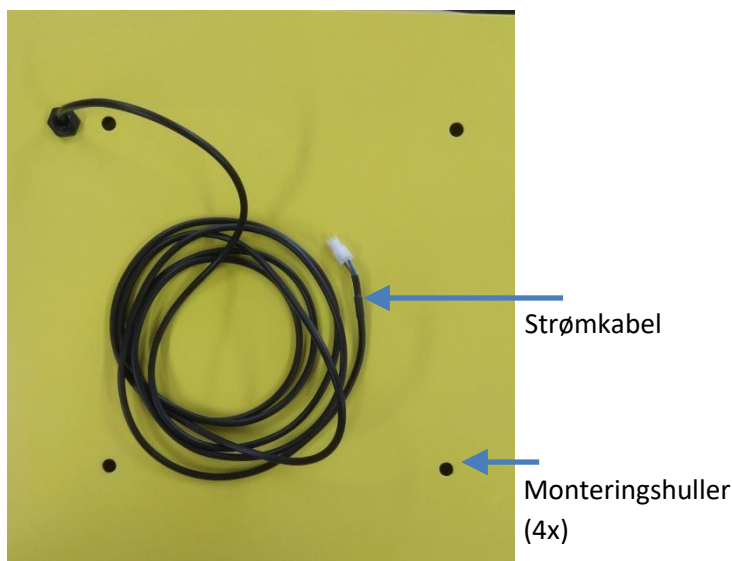

Sidste trin: placering af skiver og M8-møtrikker på indersiden



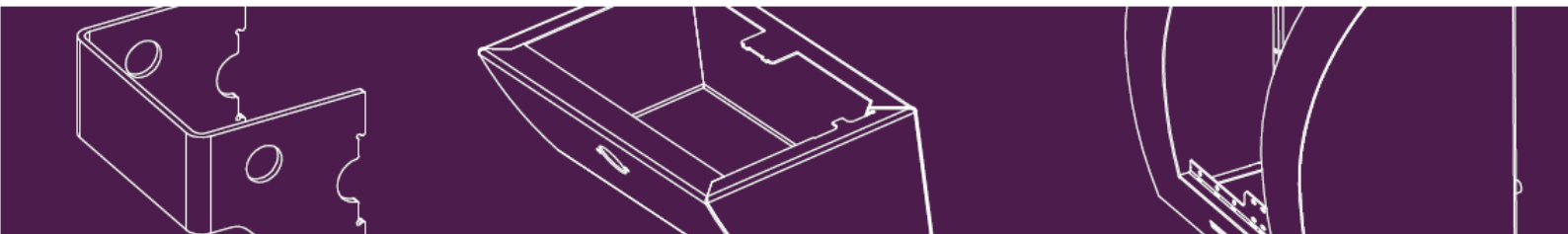

Advarsel Hvis væggen er svag, anbefaler vi at bruge Fischer VS 100P. Når væsken er sprøjtet ind i hullerne, skal du kun indsætte pindeskruerne. Genbrug ikke propperne i dette tilfælde. Læs instruktionerne på Fischer-etiketten omhyggeligt, og sørg for, at hullerne er helt rene, når du har boret.

Ophængning på træ Bor små huller med en diameter på ca. 4 mm i træet, og skru gevindene fast i træet, og fastgør SmartCase som beskrevet ovenfor. Vi anbefaler, at du borer de øverste huller i en højde på mellem 1,5 og 1,6 m over jorden.

Brug


SC1230 (uden lås): For at lukke skabet skal du lukke døren og dreje knappen mod uret (90 grader). For at åbne skabet skal du dreje knappen i den modsatte retning (90 grader med uret) og trække døren mod dig.

SC1240 (kodelås): Indtast den programmerede kode (standardkode = 333) ved at dreje på nummerhjulene og dreje hele låsen med uret. Hvis du har mistet koden, kan du bruge nøglen til at gendanne koden og derefter åbne skabet: se afsnittet om **justering af kode**.

Ændre kode: se afsnittet "Tilpas kode"

Vigtigt Det er obligatorisk altid at have koden og nøglen til rådighed i tilfælde af et nødopkald (gælder for SC1240). På grund af en defekt eller forkert programmeret kode kan det ske, at låsen ikke åbner, når koden bruges. I dette tilfælde er det nødvendigt at have et alternativ til at åbne skabet (nøgle). Det er også vigtigt at øve ovenstående procedurer, før AED'en opbevares, og at gentage dem regelmæssigt, når AED'en er installeret. Med nøglen kan den programmerede kode gendannes (nøglen kan ikke bruges til at åbne skabet direkte): se afsnittet "Tilpas kode".



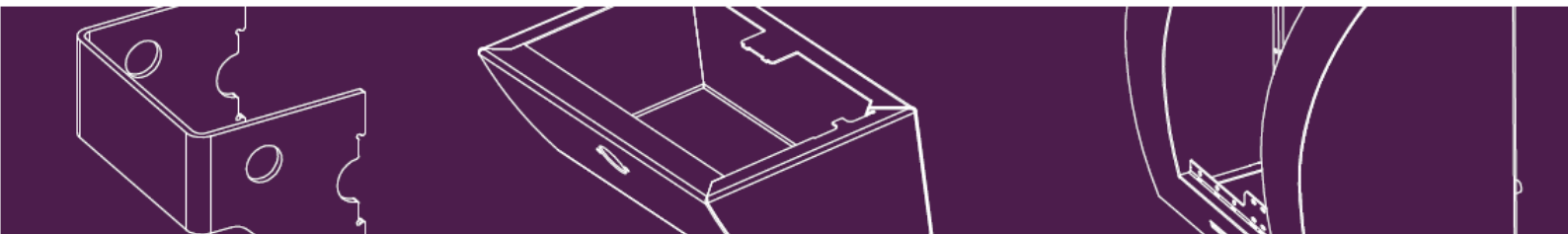

Vedligeholdelse og fejlfinding

Vedligeholdelse Det er vigtigt at åbne og lukke SmartCase (gælder kun SC1240) en gang om måneden for at kontrollere, at låsesystemet stadig fungerer korrekt. Når du gør dette, bør du også omhyggeligt gennemgå AED'ens status (se AED'ens manual for dette).

Det er også vigtigt at gennemgå skabets generelle tilstand for eventuelle skader, der potentielt kan påvirke dets funktion.




Hvis der konstateres skader, skal du kontakte din SmartCase-forhandler. Afhængigt af skaden kan det være tilrådeligt at fjerne AED'en fra kufferten og informere brugerne om status (ikke anvendelig).


Temperatur Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det elektriske varmeelement fungerer (og udendørstemperaturen er lavere end 0°C / 32°F), skal du fjerne AED'en og kontakte din SmartCase-forhandler. SC1230/1240 er udstyret med aktiv ventilation. Omkring 30°C tænder ventilatoren for at blæse varm luft ud i toppen og trække kølig luft ind i bunden af kabinettet. Vi anbefaler dog at placere kabinettet i skyggen for at undgå høje temperaturer (over 50°C).

*Tilpas kode (SC1240)***Råd om
sikkerhed**


1. Ved levering var koden til kombinationslåsen fabriksindstillet til 333.
2. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du straks ændre koden til din personlige kode.
3. **Lad aldrig nummerhjulene stå på din personlige kode.**
4. Den personlige kode skal indtastes for at åbne låsen og for at lukke den.
5. Hvis koden mistes, kan låsen åbnes med servicenøglen. Kontakt administratoren for at åbne låsen og ændre koden.

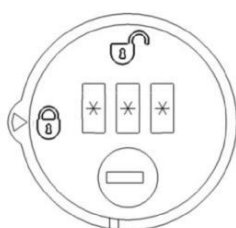Åbning


1. Ved idriftsættelse skal du først indtaste fabrikskoden: 333. Eller brug din egen personlige kode (se punktet "Tilpas kode").

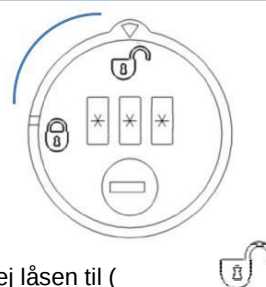


2. Drej låsen til (låsen vil åbne sig)

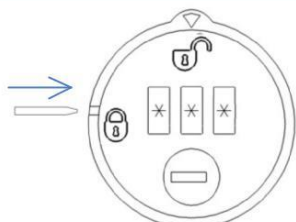Skift kode


1. I åben position og med indtastet kode skubbes en lille stift (f.eks. en papirclips) ind i kodeindstillingshullet på siden af låsen. Tryk stiften helt ind, og hold trykket.

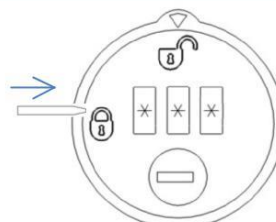

2. Indtast en ny personlig kode
3. Fjern pinkoden (den personlige kode er blevet ændret)

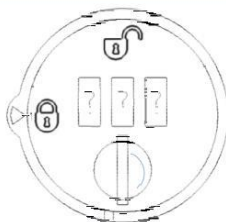Gendan kode

1. Sæt servicenøglen ind i låsecylindren. Drej nøglen mod uret

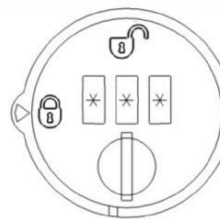


2. Drej kodehjulene opad, indtil de låser (koden er fundet)
3. Drej nøglen tilbage, og tag den ud

Kontrollér altid den justerede kode ved at åbne SmartCase med den nye kode.




ADVARSEL

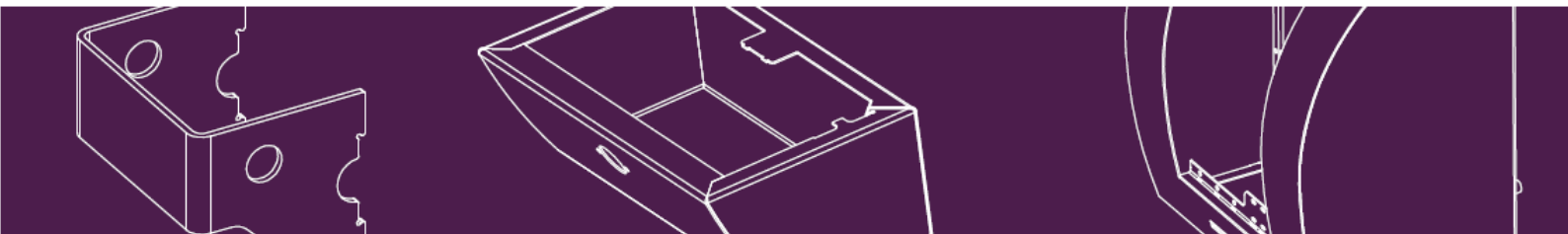

Fejlfinding

Symptom	Handling
LED-belysning virker ikke, eller alarmen virker ikke	- Kontrollér strømforsyningen og adapteren: LED'en på adapteren skal lyse konstant (en blinkende LED eller ingen LED indikerer en fejl). - Sørg for, at alle stik er korrekt tilsluttet. (inklusive stikkene inde i kabinettet) Hvis skabet fortsætter med at fungere dårligt, skal du tage det ud af drift og kontakte din SmartCase-forhandler.
Temperaturen (opvarmning) i skabet fungerer ikke korrekt	Temperaturen styres af temperatursensorer inde i skabet. Varmeren tænder, når udetemperaturen er under 10-15 °C, og slukker, når skabets indvendige temperatur når op på 20-25 °C. Bemærk: Skabsdøren skal være lukket, for at varmelegemet kan fungere korrekt. Hvis der er mistanke om, at varmelegemet ikke fungerer: - Åbn døren. Alarmen bør gå i gang. Hvis alarmen ikke virker, skal du følge trinnene: "LED-belysningen virker ikke, eller alarmen virker ikke". - Kontrollér varmfunktionen inde i skabet ved at røre ved den skuffe, hvor AED'en er placeret (udetemperaturen skal være < 0 °C). Skuffen skal føles varmere end udetemperaturen. Hvis den ikke er det: Tag skabet ud af brug, fjern AED'en, og kontakt Smart Case-forhandleren. Varmen er tændt konstant: - Fjern AED'en. - Kontrollér, at skabsdøren er lukket korrekt. Hvis døren er åben, skal du lukke den. Vent 5 minutter, og kontroller, at varmelegemet er slukket. - Hvis enheden fortsætter med at fejle, skal du fjerne AED'en, tage den ud af drift, trække stikket ud og kontakte SmartCase-forhandleren.
Låsen åbner ikke, når den programmerede kode bruges	- Omprogrammer koden i henhold til denne vejledning - Prøv at lukke og åbne skabet med den nye kode Hvis låsen stadig ikke virker, skal du kontakte din SmartCase-forhandler.
Skabet lukker ikke ordentligt	- Se efter, om der er noget, der blokerer døren. - Tjek, om låsen eller døren er deformeret i nærheden af låsemekanismen Hvis skabet ikke kan repareres, skal du tage det ud af drift og kontakte din SmartCase-forhandler.

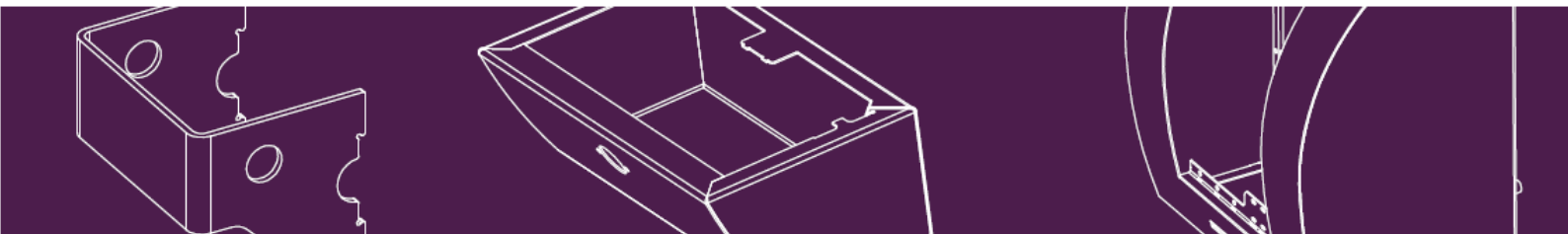

Ordliste

AED

AED'en (automatisk ekstern defibrillator) er en vigtig enhed til primær hjælp i tilfælde af hjertesvigt. Det er vigtigt, at AED'en er beskyttet, sikret og tilgængelig 24/7 til øjeblikkelig støtte i en nødsituation.

Operatør/bruger

Den person, der er ansvarlig for skabet og AED'en. Hans/hendes opgave er at kontrollere AED'ens og skabets status og sikre, at skabet bruges i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.

Online service

For mere information eller online hjælp, besøg vores hjemmeside på www.sixcase.com.


Brugermanual Manualen indeholder alle nødvendige oplysninger om, hvordan man bruger SmartCase. Opdateringer offentliggøres på vores hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse: GT MEDICARE er på ingen måde ansvarlig for tilgængeligheden eller anvendeligheden af den AED, der opbevares i SmartCase-skabet. GT MEDICARE er ikke ansvarlig for installation, brug eller anvendelse af skabet/AED'en, og heller ikke for tab af data, indkomst, direkte eller indirekte, og heller ikke for skader forårsaget af tredjeparter. Ekstraordinære forhold, såsom lave temperaturer, defekte komponenter eller andre eksterne faktorer kan resultere i, at AED'erne ikke kan anvendes. GT MEDICARE forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre dette dokument og alle relaterede produkter i denne manual uden forudgående varsel.



Kontakt

GT Medicare BV
Industrieweg 36A
2382 NW Zoeterwoude
Nederlandene
T +031 (0) 71 2100 229
[E info@sixcase.com](mailto:info@sixcase.com)

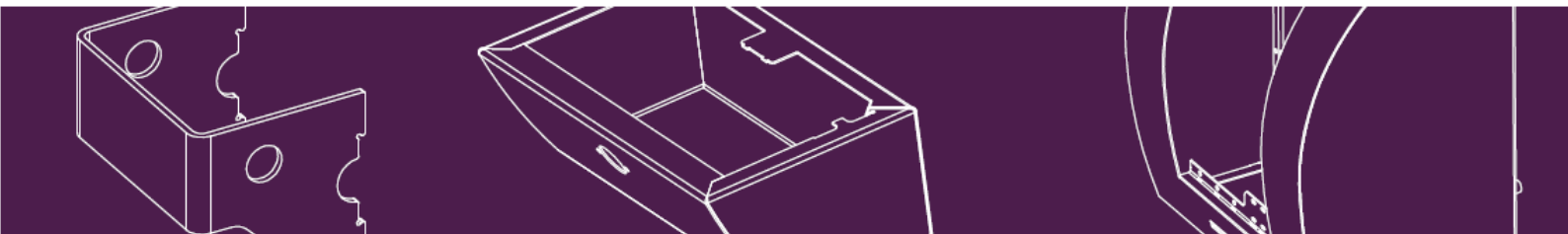

Appendiks A: Teknisk specifikation

Teknisk specifikation

Type	SC1230 / SC1240
Vægt	6 kg
Dimensioner	40(h)x40(b)x20(d)cm
Stødsikker	IEC61439-5 paragraf 10.2.101.2/3
Vandtæt	IP54
Køling	Aktiv ventilation
Opvarmning	Elektrisk op til -20 °C udendørstemperatur
Korrosionsbestandig	Rustfrit stål med belægning
Vindue	Slagfast polykarbonat
Installationssæt	Indkapslet (træ og sten)
Strømforsyning	24V Transformer (inkluderet)
Åbning	SC1230: Dørknop SC1240: Mekanisk 3-cifret lås (uafhængig af strømforsyning)
Belysning	LED rød og blå
Akustisk alarm	+/- 95dB intermitterende